

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске Војске 53			УП-10-022
<i>Прање лабораторијског посуђа у Служби за хематолошку и биохемијску дијагностику</i>				
Страна 1 од 3	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	5	2023-02-10	мр фарм. Анђела Митровић руководилац Службе за хематолошку и биохемијску дијагностику	Е

1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

1.1 Предмет упутства

Овим упутством је описан начин прања лабораторијског посуђа и прибора у Служби за хематолошку и биохемијску дијагностику (у даљем тексту Служба) Јавне здравствене установе Болнице „Свети Врачеви“ Бијељина (у даљем тексту Болница Бијељина).

1.2 Подручје примјене

Ово упутство су обавезне да примјењују спремачице, као и сво друго запослено особље у Служби.

1.3 Надлежности за примјену

За доследну примјену овог упутства надлежан је руководиоца Службе.

2. ВЕЗА С ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

2.1 Референтни документи

Нема.

2.2 Остали документи

- ПР-10-028: Поступак управљања медицинским отпадом,
- УП-10-047: Руковање оштрим предметима,
- УП-10-137: Мјере заштите на раду у Служби за хематолошку и биохемијску дијагностику.

3. ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ

Нема.

4. ОПИС ПОСТУПКА

Поступак прања лабораторијског посуђа и прибора дефинисан је према врсти материјала од којег су посуђе и прибор за рад направљени (стакло или пластика). Овим упутством се дефинише:

- организовање правилног одлагања отпадног материјала,
- организовање правилног одлагања употребљеног лабораторијског посуђа и прибора,
- начин прања лабораторијског посуђа и прибора,
- начин сушења лабораторијског посуђа и прибора,
- као и услови под којима се ови процеси обављају.

4.1 Простор и опрема

4.1.1 Увод

Болница Бијељина	Страна 2 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-022
		5	2023-02-10	

Служба за хематолошку и биохемијску дијагностику Болнице Бијељина је савремено опремљена лабораторија са високим степеном аутоматизације. За узорковање се користе вакутајнери, а апарати користе прибор и потрошни материјал који је, као и вакутајнери, намјењен за једнократну употребу. Овај отпадни материјал се одлаже у складу са прописима на нивоу Болнице. Ипак, свакодневно постоји потреба да се мања количина лабораторијског посуђа и прибора опере. На радним мјестима су посуде у које лаборанти и биохемичари одлажу прљаво посуђе и прибор. Посуде спремачице носе у посебно одвојену просторију која служи за прање. У перионици су, једна поред друге, прљави и чиста линија прања.

4.1.2 Прљави линија

Прљаву линију у перионици чини простор гдје се доноси употребљено лабораторијско посуђе и прибор и гдје се почиње са поступком одбацивања биолошког материјала, као и прањем прљавог посуђа. Ту су:

- радни сто који служи за одлагање прљавог посуђа,
- судопера за прање,
- контејнер – жута врећа у коју се скупља чврсти биолошки материјал – отпад према процедури ПР-10-028: *Поступак управљања медицинским отпадом* и упутству УП-10-109: *Руковање оштрим предметима*.

Прљавој линији припада и сакупљање течног хемијско-инфективног отпада из хематолошких бројача и апарата за гасне анализе. Отпад се сакупља у канте од чврсте пластике и односи из Службе како је дефинисано у процедури ПР-10-028: *Поступак управљања медицинским отпадом*.

4.1.3 Чиста линија

Други дио перионице чини простор у коме се налази опрема која се користи за већ опрано лабораторијско посуђе. У овој линији се налазе:

- контејнер са дестилованом водом,
- радни сто који служи за одлагање опраног лабораторијског посуђа,
- сушница за сушење стакленог посуђа,
- тацна на којој се спонтано суши пластично посуђе,
- ормарићи за одлагање чистог посуђа.

4.2 Средства за прање

4.2.1 Детерџенти

У перионици се користе различите врсте детерџената за прање лабораторијског посуђа:

- течни детерџент за ручно прање посуђа,
- детерџент за ручно прање,
- варикина.

4.2.2 Вода

За прање лабораторијског посуђа користи се расположива вода из градске мреже.

Након прања лабораторијско посуђе се испира водом која је добијена реверзном осмозом.

4.2.3 Прибор за прање

За прање посуђа користе се четке различитих димензија према типу посуђа које се пере и спужве за прање.

Болница Бијелина	Страна 3 од 3	Издање:	Важи од:	УП-10-022
		5	2023-02-10	

4.3 Поступак прања

4.3.1 Поступак прања стакленог посуђа

Лабораторијско посуђе се пере одмах након употребе.

Поступак прања састоји се из следећих корака:

- Из прљавог посуђа се пажљиво уклања садржај, ако се ради о биолошком материјалу, и са њим даље поступа у складу са прописима за поступање са отпадом на нивоу Болнице, ПР-10-028: *Поступак управљања медицинским отпадом*.
- Након уклањања садржаја, посуђе се испира текућом водом уз, ако има потребе, употребу четке.
- Стаклено посуђе потапа се у воду с одговарајућим дезинфицијенсом (варикина или неки раствор с натријум хипохлоритом који се користи према упутству произвођача) и оставља да стоји 1-2 сата.
- Четкама за прање посуђа или спужвама уз употребу детерџента и топле воде посуђе се пере и уклањају се етикете или друге ознаке од фломастера.
- Посебна пажња се посвећује испирању, јер посуде за рад морају бити апсолутно чисте. Испирање се врши под млазом текуће воде.
- Даље се испирање врши под млазом воде добијене реверзном осмозом.
- Посуђе се оциједи и слаже у металне корпице.
- Сушење се врши у сушници на 180°C 90 минута.

4.3.2 Прање пластичног посуђа

Пластично посуђе пере се истим поступком као и стаклено. Након прања слаже се на тацну и суши на собној температури.

4.3.3 Поступак прања прибора за прање, и ормарића за одлагање чистог посуђа

Четке се перу свакодневно топлом водом и детерџентом.

Спужве се перу свакодневно топлом водом и детерџентом, а употребљавају се најдуже 7 дана и затим бацају.

Сушница и ормарићи за одлагање чистог посуђа бришу се према Плану одржавања хигијене УП-10-138: *Обезбјеђење и праћење услова средине у процесу испитивања*.

4.4 Надзор и провјера процеса прања посуђа

Надзор над процесом прања и сушења лабораторијског посуђа и прибора врши главни лабораторијски техничар.

4.5 Заштита спремачица при прању лабораторијског посуђа

Приликом обављања прања лабораторијског посуђа спремачице обавезно носе гумене рукавице и гумене кецеље (и за спремачице важе све мјере заштите детаљно описане у упутству УП-10-137: *Мјере заштите на раду у Служби за хематолошку и биохемијску дијагностику*).

5. ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ

Нема.

6. ЗАПИСИ

Нема.