

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске војске 53			ОП-10-025
Упутство за коришћење опреме QuikRead Go-Orion Diagnostica				
Страна 1 од 2	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	2	2023-03-22	мр их Анђела Митровић руководилац Службе за хематолошку и биохемијску дијагностику	Е

1. НАЗИВ ОПРЕМЕ

Апарат за окултно крварење QuikRead Go-Orion Diagnostica.

2. РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА

(позивање на изворна документа на основу којих се упутство формира)

Упутство за употребу: QuikRead go® Instrument

3. НАМЈЕНА ОПРЕМЕ

Инструмент за мјерење разних анализа (хемоглобина, CRP, *Streptococcus pyogenes*) из узорака пацијената, ако помоћ у дијагностиковању и праћењу успјешности терапије.

4. ЗАХТЈЕВАНИ УСЛОВИ СРЕДИНЕ

- коришћење у затвореној просторији; надморска висина до 2000 m
- температура: 15°C-35°C
- релативна влажност: <80% за температуру до 31 °C, линерано се смањује до 67% реалтивне влажности на 35 °C
- без утицаја директне сунчеве свјетлости, јаког магнетног или електричног поља
- без мјерења када је возило у покрету
- без помјерања током мјерења

5. ПОСТУПАК ПРИКЉУЧЕЊА ОПРЕМЕ

Сервисер за инструмент, позиционира, прикључи и инсталира центрифугу према упутствима произвођача.

6. МЈЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИЛИКОМ РУКОВАЊА И КОРИШЋЕЊА

- инструмент не помјерати током мјерења;
- не проливати течности на инструмент;
- уколико се на инструмент пролије потенцијално заразни материјал, мора бити обрисан упијајућим папиром, а контаминирани дијелови деконтаминирани;
- користити оригиналне реагенсе и акумулатор;
- не стављати прсте или било које екстерне уређаје у инструмент током мјерења.

7. РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ

- Изабрати *Мјерење* на главном менију и пратити инструкције на дисплеју.
- Спустити кивету у отвор за мјерење у правилан правилном положају.
- Поклопац се затвара и инструмент почиње мјерење.

Болница Бијељина	Страна 2 од 2	Издање:	Важи од:	ОП-10-025
		2	2023-03-22	

- По завршетку теста, резултат се приказује на дисплеју, кивета се подиже.
- Уклонити кивету.
- При следећем мјерењу, убацити нову кивету у отвор за мјерење.
- При избору *Откажи* инструмент се враћа у главни мени.

8. ПОСТУПАК ОДРЖАВАЊА

8.1 Интерно одржавање

Повремено очистити спољашњи дио инструмента коришћењем тканине овлажене водом. Обратити пажњу на чишћење дисплеја. Ако је неопходно, може се користити благи детерџент.

8.2 Екстерно одржавање

Периодично, у оквиру редовних сервиса овлаштени сервисери одржавају апарат, али и ванредно, у случају квара, у складу са ПР-10-014: *Процедура превентивног и корективног одржавања опреме и објекта*.

9. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ КВАРА ИЛИ НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ

9.1 Мјере које може предузети овлашћени руковалац

Руководилац и одговорни биохемичар покушавају прво отклонити неправилност у складу са својим могућностима, самостално или у координацији са сервисером. Уколико се тај процес не спроведе успјешно, руководилац контактира овлашћеног сервисера да у што краћем року стави опрему у функцију. Опрема се до стављања у функцију, означава као неисправана.

9.2 Мјере које спроводи овлашћени сервисер

Овлаштени сервисер отклања кварове и неправилности у раду које биохемичар није успио, према инструкцијама произвођача.

10. ПОСТУПАК ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ ОПРЕМЕ

У склопу деконтаминације инструмента врши се чишћење површина уређаја стандардним лабораторијским дезинфицијенсима или 70% етанолом и памучном крпом. Након употребе средстава за деконтаминацију, остатке средства уклонити накнадним брисањем влажном крпом и посушити.