

	Јавна здравствена установа Болница „Свети Врачеви“ Бијељина Српске војске 53			ОП-10-035
Упутство за коришћење опреме <i>STA Compact, STAGO</i>				
Страна 1 од 2	Издање:	Важи од:	Одобрио	Копија број
	2	2023-03-22	мр пх Анђела Митровић руководилац Службе за хематолошку и биохемијску дијагностику	Е

1. НАЗИВ ОПРЕМЕ

Апарат за одређивање параметра хемостазе *STA Compact, STAGO*.

2. РЕФЕРЕНТНА ДОКУМЕНТА

(позивање на изворна документа на основу којих се упутство формира)

- STA Compact, User's guide.

3. НАМЈЕНА ОПРЕМЕ

Одређивање параметара хемостазе.

4. ЗАХТЈЕВАНИ УСЛОВИ СРЕДИНЕ

- температура: 15-31°C
- релативна влажност: 20-85%
- слободан простор око апарата на мјесту инсталације
- без излагања изворима топлоте и уређајима за расхлађивање
- апарат мора бити на сувом мјесту
- околина без прашине са одговарајућом вентилацијом и без примјетне вибрације

5. ПОСТУПАК ПРИКЉУЧЕЊА ОПРЕМЕ

Сервисер за *STAGO* анализаторе распакује, позиционира и инсталира апарат као и додатну опрему која га прати. Прије прикључивања напајања провјерити јесу ли: све компоненте адекватно инсталиране; сви реагенси адекватно напуњени, сви каблови за напајање адекватно прикључени. Уређај укључити постављањем главног прекидача за напајање у положај ON, а затим укључити монитор.

6. МЈЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИЛИКОМ РУКОВАЊА И КОРИШЋЕЊА

- инструмент мора бити инсталиран на сувом мјесту са добром вентилацијом на коме нема прашине, без излагања директној сунчевој свјетлости и великим варијацијама у температури и заштићен од прскања воде из славине
- сви дијелови површине инструмента се сматрају потенцијално инфективним, те приликом руковања, сервисирања и поправке препоручује се употреба заштитне опреме (рукавице, маске, мантиле...)
- уколико се дође у контакт са потенцијално инфективним материјалима и површинама, испрати кожу водом, а затим обавити процедуру чишћења и деконтаминације
- при руковању са реагенсима потребно је придржавати се упутства произвођача

7. РУКОВАЊЕ ОПРЕМОМ

- На почетку радног дана ставити бочице са реагенсима и контролама, тако што се прво отворе врата за дио у који се смјештају реагенси притиском на тастерску опцију **F2**. Затим се скенирају бочице преко читача баркодова, притисне **Enter** и бочице смјесте на одговарајуће позиције.

Болница Бијељина	Страна 2 од 2	Издање:	Важи од:	ОП-10-035
		2	2023-03-22	

- Притиском на дугме **F1** отварају се врата за дио у који се смјештају узорци. Скенира се баркод узорка, притисне **Enter** и узорак стави на одговарајућу позицију. Опцијом **F10** бира се одређени тест, а затим поново изабере **Enter**. Када су сви узорци смјештени у апарат, бира се опција **ESC**, затим **Enter**, након чега се врата дијела за узорке затварају и аналитички дио одпочиње.
- Процес анализе контроле се врши аутоматски сваки дан, у одређеном временском периоду.
- На крају радног дана реагенси се вади из анализатора, притиском на дугме **F2**. Након вађења врата се затварају одабиром на тастатури **ESC** и **Enter**.

8. ПОСТУПАК ОДРЖАВАЊА

8.1. Интерно одржавање

Свакодневно одржавање апарата се врши кориштењем реагенса *Cleaner Solution*, док се мјесечно одржавање врши раствором натријум хипохлорита.

8.2. Екстерно одржавање

Периодично, у оквиру редовних сервиса овлаштени сервисери одржавају апарат, али и ванредно, у случају кvara, у складу са ПР-10-014: *Процедура превентивног и корективног одржавања опреме и објеката*.

9. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ КВАРА ИЛИ НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ

9.1. Мјере које може предузети овлашћени руковалац

Руководилац и одговорни биохемичар покушавају прво отклонити неправилност у складу са својим могућностима, самостално или у координацији са сервисером. Уколико се тај процес не спроведе успјешно, руководилац контактира овлашћеног сервисера да у што краћем року стави апарат у функцију. Апарат се до стављања у функцију, означава као неисправан.

9.2. Мјере које спроводи овлашћени сервисер

Овлаштени сервисер отклања кварове и неправилности у раду које биохемичар није успио, према инструкцијама произвођача.

10. ПОСТУПАК ДЕКОНТАМИНАЦИЈЕ ОПРЕМЕ

У склопу деконтаминације опреме врши се пребрисавање површина уређаја 70%-тним алкохолом.